

Toallitas para desinfección de  
equipamiento médico y superficies.

esteeer<sup>®</sup> SEPT



TBC, VIH  
HBV, HCV  
Fung, Bact  
Gripe(H5N1)



↓  
Bolsa de recambio  
120 toallitas

↓  
Bote con  
120 toallitas

## MODO EMPLEO



Extraer una toallita  
del bote o recambio.



Frotar la toallita  
desinfectante por  
toda la superficie a  
desinfectar.



Dejar actuar durante  
30 segundos - 1  
minuto. No es  
necesario secar.

**TUBERCULICIDA**  
**BACTERICIDA**  
**FUNGICIDA**  
**VIRUCIDA**



## INFORMACIÓN GENERAL

Toallitas para desinfección de equipamiento médico y superficies.

Toallitas para la desinfección de pequeñas superficies resistentes al alcohol, equipamiento, y mobiliario de consultas médicas y dentales así como para hospitales.

Las superficies tratadas se secan sin dejar residuos en un corto periodo de tiempo. Respetar los tiempos de aplicación.

Libre de aldehídos

Sin compuestos cuaternarios, luego no produce irritación de las vías respiratorias.

Altamente compatible y cuidadoso con todos los materiales excepto acrílicos.

Ingredientes activos:

100 g. contienen:

Etanol 40,50 g.  
n-propanol 9,20 g.

Actividad microbiológica y tiempo de actuación:

Espectro	Carga Orgánica		Tiempo de actuación
	sin	con	
Bacterias y hongos <sup>1</sup>	●	●	30 segundos
Tuberculosis <sup>2</sup>	●		
		●	1 minuto
Virus	HCV / HBV / VIH	●	30 segundos
	Adeno	●	
	Rota	●	
	Vaccinia Virus	●	
	SARS	●	
	Herpes	●	
	Gripe (incl. H5N1, H1N1)	●	

<sup>1</sup> Desinfección de superficies de acuerdo con VAH/DGHM

<sup>2</sup> M. Terrae

## PRECAUCIONES

Informes de expertos sobre el producto:

Prof. Dr. H. P. Werner, Bischofshofen; Prof. Dr. A. Kramer, Greifswald; Dr. J. Steinmann, Bremen.

- Contiene alcohol. Comprobar compatibilidad de los materiales. No usar con cristal acrílico.
- Etiquetado de acuerdo a la ordenación sobre mercancías peligrosas.
- R10: Inflamable. Punto de ignición de 30°C de acuerdo a DIN EN ISO 3679.
- Irritante para los ojos.
- Mantener alejado de los niños.
- Mantener alejado del fuego. No fumar.
- No respirar los vapores.

Sanhigia, S.L. Polígono Industrial Lastra Monegros, Calle Beta, B6. 50177 Bujaraloz (Zaragoza). Tel: 976 179

346 www.sanhigia.com dcomercial@sanhigia.com

