



ABORDAJE DE LA
PERIIMPLANTITIS

PT-B

Cinco - en - Uno

Limpiador Dental con Aeropulidor

Producto asociado a la
Terapia 360.



- Aeropulidor
- Preparación antes de las restauraciones
- Tratamiento periodontal
- Tratamiento endodóntico
- Mantenimiento de implantes

Sanhigía

THINK SURGICAL

Protocolo de tratamiento Periodontal de última generación. Terapia guiada para la eliminación de la placa dental.

Cinco funciones en un solo sistema:

1. Aeropulidor

Indicado tanto para el tratamiento de la profiláxis supra como subgingival.

Doce niveles de volumen de agua y potencia.

Cuatro configuraciones de temperatura para una mayor comodidad .

Limpieza mediante ultrasonidos

2. Preparación antes de las restauraciones

3. Tratamiento periodontal

4. Tratamiento endodóntico

5. Mantenimiento de implantes



Referencia* W-PTB

El limpiador dental con aeropulidor PT-B es la última versión mejorada del anterior sistema PT-A.

***Consulte condiciones de compra con su delegado comercial de Sanhigía.**



Control eficiente de la temperatura para un mayor comfort



Pedal inalámbrico para fácil control, carga completa autonomía de 72h



Pantalla Ultra HD para una perfecta visualización



Identificación automática del modo de limpieza

Diseño mejorado de la pieza de mano

Pieza de mano totalmente metálica y ligera para mayor durabilidad y comodidad

Exterior: agua

Proporcionar protección y agua caliente. Limpieza, recogida y ajuste

Interior: aire comprimido + polvo

Elimina pigmentos, placa, suciedad y sarro reciente



Diseño mejorado de la pieza de mano
Desmontable en tres secciones, sistema antibloqueo, fácil de desatascar y limpiar



Pieza de mano Supragingival

Boquilla de calibre pequeño de 0,7 mm, mayor concentración de aire para una mejor eficiencia del pulido y escalado. La alta concentricidad de la ruta aire-agua mezcla el polvo con agua, lo que minimiza la dispersión del polvo. No daña los tejidos blandos ni raya la superficie del diente.




Pieza de mano Subgingival

La boquilla permite la salida de polvo desde tres orificios y la salida de agua desde uno. Asegúrese de que la proporción de mezcla es la adecuada de agua, aire y polvo, para lograr la eliminación completa del biofilm. Realizado en material polimérico, giratorio 360° y flexible facilitando el acceso a ciertas zonas. Realiza una limpieza completa de las bolsas periodontales.

Impresionante sistema de control de temperatura

300W de potencia
4 ajustes de temperatura:
25°C, 30°C, 35°C, 40°C
Alta eficiencia automática,
Precalentamiento
Tratamiento mas cómodo
para el paciente

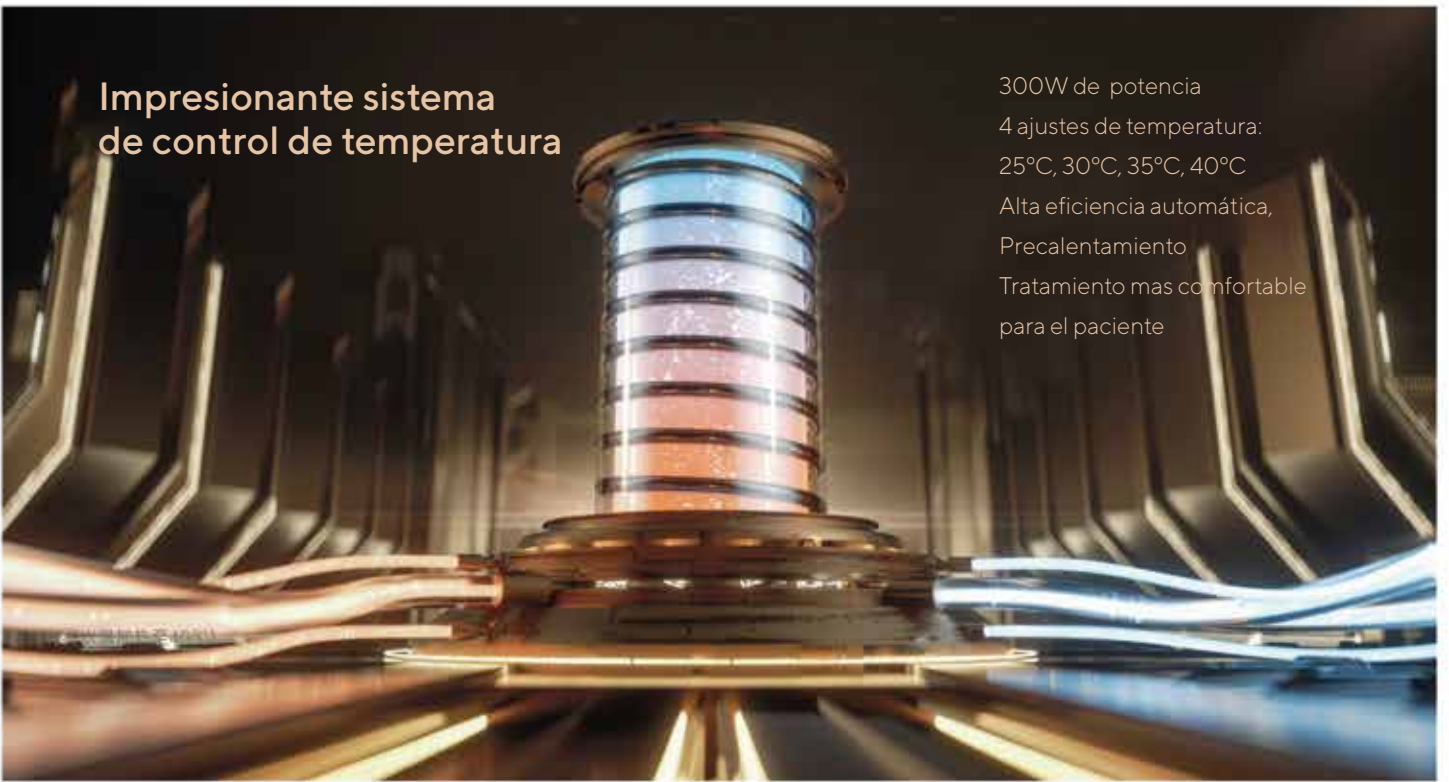

Punta de aleación de titanio

Dureza inferior a la del esmalte.
Más elástico y cómodo.
Dureza de la punta de aleación
de titanio: HRC30.



Sistema de suministro de agua dual

Sistema 1: Suministro de agua externo.
Sistema 2: Dos botellas de agua (600ml, 1400ml),
puede contener soluciones específicas como clorhexidina,
peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, etc.
Las marcas en el cuerpo transparente de la botella facilitan
la preparación de las distintas soluciones médicas.


Limpieza automática de los conductos

Modo de pulido de aire: 20S para eliminar el polvo residual
del conducto, evitando el bloqueo.
Modo de ultrasonidos escalado: 30S para eliminar el
polvo residual del conducto, para evitar la corrosión.
Limpieza automática tras 5min de inactividad.



Puntas

Tratamiento periodontal.

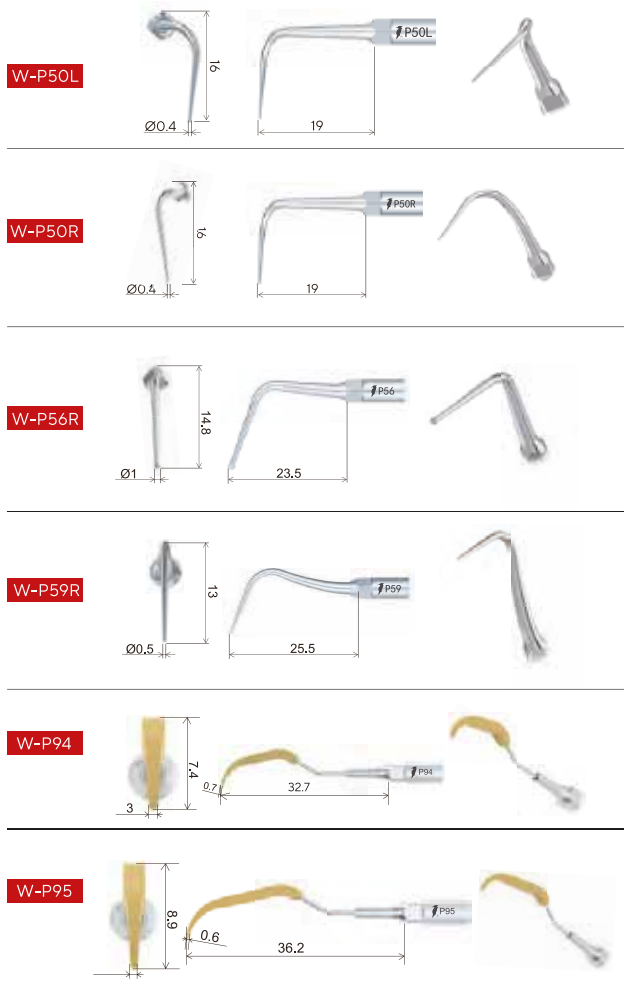


Formato de venta: Caja de 1 unidad

Periodoncia.



Endodoncia.

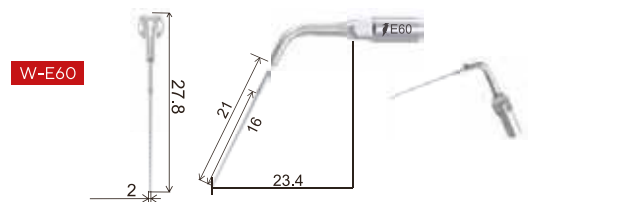

Subgingival.



Formato de venta: Caja de 10 unidades

Formación on - line gratuita

Comprando el limpiador dental con aeropolido PT-B dispondrás de forma gratuita de una formación on-line impartida por las dras. Vanessa Ruíz Magaz y Beatriz Lorza. Para más información consulta con tu delegado comercial de Sanhigía.



Dra. Vanessa Ruiz Magaz

Periodoncista. Práctica privada en Barcelona / Lérida



Dra. Beatriz Lorza

Odontóloga. Práctica privada en Zaragoza



Fast / POLVO DE BICARBONATO DE SODIO

El bicarbonato de sodio de 65 μm se utiliza para la eliminación rápida de pigmentos rebeldes, suciedad ligera y biofilm en la encía adulta.

- Dureza de 2,5 Mohs

Proporciona una eliminación eficaz y rápida del pigmento persistente, la suciedad ligera y el biofilm en la encía adulta.

Formato de venta:

Caja de 4 botes de 300 g.

W-SUP-POWM

Polvo supragingival bicarbonato sabor melocotón 65 μm

W-SUP-POWF

Polvo supragingival bicarbonato sabor fresa 65 μm

W-SUP-POWL

Polvo supragingival bicarbonato sabor limón 65 μm



Gentle Mini / POLVO SUBGINGIVAL DE GLICINA

La glicina de 25 μm es suave y no invasiva para el tejido blando en la bolsa periodontal, y para la encía, el maxilar superior y la superficie del tejido dental, puede usarse para el mantenimiento de dientes pediátricos, ortodoncia, restauraciones, periodontal e implantes.

- Ligeramente dulce

Sabor agradable, especialmente para los niños.

- Menor dureza que la dentina

Se puede usar con seguridad en raspado subgingival, limpieza y mantenimiento periodontal y de implantes.

Formato de venta:

Caja de 4 botes de 120 g.

W-SUP-POWG

Polvo supragingival glicina 65 μm

W-SUB-POWG

Polvo supragingival glicina 25 μm

PT-B
Limpiador dental
con aeropulidor



Diseño del tanque único en este tipo de sistemas

Sistema líder en la entrada y salida de aire concéntrico.
Mejora la consistencia del flujo de aire.
Potencia de salida más uniforme.

Diseño en forma de embudo

Centro simétrico estructura en forma de embudo.
Diseño aerodinámico.
Salida de potencia más estable.
Limpieza más eficiente.

Estructura transparente

El cuerpo del tanque al ser transparente permite ver el flujo de polvo y su cantidad sobrante.

Fácil instalación

Tanque enchufable, se puede instalar en cualquier ángulo.
Rotación de 360° para mayor comodidad.



Referencia CARRO PT-B



Tratamiento con ultrasonidos

Trayectoria de vibración elíptica

Incluye la tecnología piezo eléctrica para realizar el movimiento elíptico, que divide la fuerza del impacto entre la punta y los dientes, logrando una limpieza más cómoda.

Seguimiento de la frecuencia en tiempo real

El control dinámico de la frecuencia de vibración y el ajuste automático en función de las características de la punta, garantizan un rendimiento óptimo de la misma.

Caso Clínico. Terapia periodontal básica.



Sonia Rodríguez
Higienista.

Práctica clínica exclusiva en periodoncia e implantes.
Miembro del equipo docente del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid en el Modular de periodoncia y mantenimiento de implantes.
Miembro del equipo docente de SEPA en el Modular de Periodoncia para higienistas dentales.



Escaneando este código QR podrá ver el webinar realizado por Sonia Rodríguez "El aeropulido y su influencia en la fidelización del paciente".



3.Tinción biofilm con revelador de placa



1.Visión genérica inicial



4.Eliminación de biofilm con aeropulido (polvo glicina 25µm)



2.Visión inicial parcial



5.Eliminación de cálculo con instrumentación ultrasónica



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA POR: _____

Sanhigía

THINK SURGICAL

OFICINAS CENTRALES

C/ Felipe Sanclemente, 6 Planta -1,
Local 9-10 50001 Zaragoza

CENTRO LOGÍSTICO

Pol. Ind. Lastra Monegros
C/ Beta, Parcela B6 50177
Bujaraloz, Zaragoza

T. 976 179 346

dcomercial@sanhigia.com
store.sanhigia.com